

Rouška AirSyntex PM1 80%

Dobrý den,

děkujeme, že využíváte produkty HANSCRAFT s.r.o. Vážíme si Vaší důvěry.

Produkt:

Rouška AirSyntex - Rouška slouží k běžnému nošení a není možné jí ošetřovat nebo opakovaně používat.

Návod - Před nasazením ústní roušky si očistěte ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou. Ústní rouškou si zakryjte nos a ústa. Roušku upevněte pomocí elastických šňůrek kolem uší.* Během nošení se ústní roušky nedotýkejte; pokud tak učiníte, očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou. WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje vyměnit roušku za novou, jakmile je vlhká. Ústní roušku sundávejte zezadu (nedotýkejte se přední části roušky); roušku ihned vyhodte do uzavřeného koše; očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou.

* Pokud má Vaše rouška tkanice namísto elastických šňůr, upevněte roušku zavázáním tkanic za hlavou.

S použitou rouškou zacházejte jako s infekčním odpadem. **V aktuální situaci je ochrana dýchacích cest klíčovou proti šíření viru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19.** Pomůžeme vám se chránit!

Masky jsou účinné pouze při použití v kombinaci s častým čištěním rukou.

Rouška je vyrobena z filtračního materiálu, který poskytuje vyšší ochranu než bavlněné roušky.



- Nošením roušky AirSyntex PM1 snížíte šanci, že se nakazíte a zároveň omezíte šíření nákazy ve svém okolí.
- Neprat, nežehlit!

Datum výroby: