

Respirační rouška HANSCRAFT NANOMask AirSyntex s kapsou na výměnné filtry

Dobrý den,

děkujeme, že využíváte produkty HANSCRAFT s.r.o. Vážíme si Vaší důvěry.


Produkt: Rouška NANOMask AirSyntex - Rouška slouží k běžnému nošení.

Návod - Před nasazením ústní roušky si očistěte ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou. Vložte do roušky výměnnou vložku (filtr). Ústní rouškou si zakryjte nos a ústa. Upevněte zavázáním tkanic za hlavou. Během nošení se ústní roušky nedotýkejte; pokud tak učiníte, očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou. WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje vyměnit roušku za novou, jakmile je vlhká. Použité roušky sterilizujte horkou vodou nebo párou po každém použití nebo vyhodte do uzavřeného koše. Výměnné filtry nelze sterilizovat, sterilizujte tedy pouze samotné roušky, které následně skladujte v suchém a sterilním prostředí. Obvyklá životnost filtru jsou dva až sedm dní. Doporučujeme měnit!

S použitou rouškou zacházejte jako s infekčním odpadem. **V aktuální situaci je ochrana dýchacích cest klíčovou proti šíření viru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19.** Pomůžeme vám se chránit!

Roušky jsou účinné pouze při použití v kombinaci s častým čištěním rukou.

Rouška je vyrobena ze 100% bavlny. Filtr je vyroben ze speciálního certifikovaného materiálu, který díky filtrační účinnosti nanovláken F9 zabraňuje přenosu 80% částic a poskytuje tedy vyšší ochranu než samotné bavlněné roušky. Rouška s filtrem chrání jak uživatele roušky, tak lidi v jeho okolí.

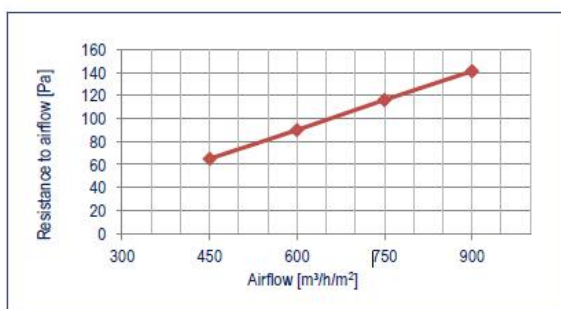

Péče o roušku:

- Nelze čistit chemicky
- Žehlení do 200°C
- Nesušit v bubnové sušičce
- Prání nebo vyvážení na max. 95°C
- Možné bělit
- Výměnný filtr není možno prát nebo sterilizovat!

Datum výroby: